

# BANDEAU RÉFRIGÉRANT

Dispositif médical de classe I GMDN N°37240



## L'emballage contient :

- 1 bandeau en tissu avec deux poches sur les cotés pour les sachets.
- 4 sachets réfrigérants.
- Gel cryogénique réutilisable fabriqué en France. Ne pas consommer.
- 1 notice.



## Mode d'emploi :

- 1- Placer les sachets à plat au congélateur au moins 3 heures avant utilisation. Pour une adaptation au plus proche du visage, il est possible de plier les sachets en deux avant de les positionner au congélateur. Si vous souhaitez des sachets plus malléables, vous pouvez les sortir du congélateur avant qu'ils soient complètement gelés.
- 2- Glisser les deux sachets dans les poches sur les cotés du bandeau.
- 3- Fixer le bandeau au sommet du crâne à l'aide des bandes auto-agrippantes (voir photos).

## Indications :

Chirurgie orthognatique.  
Extraction de dents de sagesse.  
Elévation de sinus.  
Pose d'implant dentaire.  
Chirurgie esthétique notamment pour les liftings.

## Fin de vie du produit :

Le bandeau doit être mis au recyclage des textiles.  
La notice et le sachet d'emballage doivent être mis au recyclage.  
Les sachets de gels doivent être mis avec les déchets ménagers.

## Remarques :

- Le bandeau peut être lavé et utilisé à plusieurs reprises.
- Il est conseillé d'utiliser les 4 sachets réfrigérants afin de pouvoir les remplacer régulièrement pour avoir une efficacité maximum.



**Venir avec l'ensemble (bandeau et sachets) à l'hôpital ou à la clinique, le jour de l'intervention et demander que les sachets réfrigérants soient conservés au congélateur.**



Scannez le QR code pour retrouver nos recettes liquides et molles pour la reprise alimentaire post-opératoire.